

## PALIUM™



### INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA AUTOMÁTICA - PALIUM™

1. Após a remoção da agulha descartável, coloque a pistola na máquina de lavagem e desinfecção deixando a tampa aberta e com os mecanismos internos para cima. Não cubra a pistola Palium™ com outros instrumentos. Executar a limpeza através de uma lavagem enzimática a 43 ° C durante pelo menos 5 minutos e uma subsequente lavagem com água a 60 ° - 80° C durante pelo menos 20 minutos. Após este último procedimento enxaguar o instrumento com água corrente.
2. Faça uma inspeção visual detalhada para ter certeza de que não existem vestígios de qualquer resíduo. Se o instrumento apresenta ainda vestígios de sujeira, repita o processo de limpeza.

### INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA MANUAL - PALIUM™

1. Após a remoção da agulha descartável, coloque a pistola com a tampa aberta numa tina com água fria. Lavar a pistola agitando-a, puxando-a para fora e reimmergindo-a sob a água. Para uma limpeza interna e externa perfeita, a pistola deve ter o seletor do tamanho da amostra na posição correspondente a 22mm.
2. Preparar uma solução morna com um líquido de limpeza enzimático, tal como as instruções do fabricante, e mergulhar o instrumento durante pelo menos 30 minutos.
3. Escovar todas as peças internas e externas dos instrumentos, fazendo deslizar a patilha deslizante em todas as posições para armar, até que ela não apresente impurezas visíveis. Injetar o detergente enzimático em todas as cavidades da pistola.
4. Lavar bem a pistola com água corrente, verificando mais uma vez se existe qualquer impureza.

### ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVAGEM

- Use ciclos de esterilização normalmente usados pelos hospitais para instrumentos cirúrgicos reutilizáveis.
- Use os controles biológicos corretos para validar e monitorar a realização/eficácia da esterilização.

### ATENÇÃO

- Não use soluções de glutaraldeído 2% ou outras soluções bactericidas.
- Não limpe com gluconato de clorexidina concentrada ou quaisquer outros agentes que contenham álcool.
- Não utilize produtos de limpeza altamente ácidos ou muito alcalinos.
- Não esterilize por radiação.



- Antes da esterilização, limpar e embalar corretamente a pistola Palium™.
- Para a esterilização, a pistola Palium™ deve ter o seletor do tamanho da amostra na posição correspondente a 22mm e não engatilhada.